

OpticWhite[®] 3

Профессиональная система
для отбеливания зубов дома

Руководство пользователя

Белоснежные зубы
с OpticWhite[®] 3

Инструкция по применению

- Очистите ротовую полость, затем тщательно почистите зубы пастой и хорошо прополосните водой.
- Освободите батарейки от пленки и вставьте в осветительный прибор для отбеливания зубов.
- Прикрепите капу к осветительному прибору для отбеливания зубов.
- Равномерно нанесите 0,5 мл геля на нижнюю и 0,5 мл на верхнюю часть капы, на вертикальную стенку по линии сгиба. Не наносите слишком много геля, он должен равномерно покрывать переднюю поверхность зубов и не попадать вам на губы и десна.
- Откройте рот и затем аккуратно зажмите капу зубами. Гель должен равномерно распределиться по передней поверхности зубов, не попадая на губы и десна. Протрите излишки геля, если он будет выступать за капу или попадет на десна и губы.
- Для активации геля и начала процесса отбеливания включите осветительный прибор нажатием кнопки. Внимание! Не допускайте попадания света Blue Ray в глаза, включайте прибор только после помещения капы в рот, не смотрите на него.
- Через 30 мин выключите прибор и извлеките капу изо рта.
- Тщательно прополосните рот теплой водой и промойте капу от остатков геля. Проследите, чтобы гель не оставался на деснах и зубах.
- В течение 48 часов после процедуры не употребляйте пищу с красящими пигментами (чай, кофе, вино и пр.), откажитесь от курения.
- Вы увидите результат сразу после первой процедуры. Для достижения максимального эффекта повторяйте процедуру 6 дней подряд, каждую по 30 мин. Повторный курс можно провести не ранее, чем через 6 месяцев.

В наборе OpticWhite 3 для домашнего отбеливания зубов используется инновационный гель, прошедший сертификацию в России, Европе и США. В сочетании с лампой специального спектра Blue Ray гель вступает в реакцию, выделяя активный кислород, который эффективно и бережно отбеливает зубы.

Мягкая силиконовая капа разработана с учетом анатомии полости рта. Вы будете чувствовать себя комфортно в процессе всей процедуры отбеливания зубов.

Уже после первой процедуры, которая длится всего 30 минут, вы получите видимый результат.

Сертификаты



FDA (США)



CE (Европа)



EAC (Россия)




PCT (Россия)

Использование набора




Подготовьте источник света
(удалите пленку с батареек)

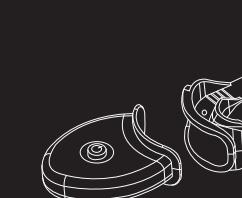

Равномерно распределите гель по поверхности капы



Тщательно прополосните рот и промойте капу

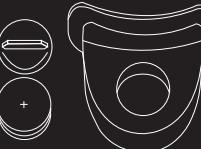

Подготовьте источник света
(удалите пленку с батареек)



Равномерно распределите гель по поверхности капы



Тщательно прополосните рот и промойте капу

Состав

Carbamide peroxide, Glycerol, Propylene Glycol, Deionized Water, Carbomer, Carboxymethyl, Poly vinylpyrrolidone, Menthol.

Советы и область применения:

- Используйте входящую в комплект полоску оттенков для фиксации первоначального цвета зубной эмали и полученного результата по окончанию процедуры.
- Наилучший эффект достигается при отказе от курения, красящих продуктов и напитков в течение всего курса.
- Максимальная продолжительность курса 6 дней.
- Повторный курс допускается не ранее, чем через 6 месяцев после окончания предыдущего.

Комплекс наиболее эффективен:

- Возрастное пожелтение зубов или появление пятен.
- Изменение цвета вследствие курения, употребления кофе, чая, других напитков и продуктов, содержащих красители.
- Незначительная тетрациклиновая пигментация.

Рекомендации:

- Перед процедурой зубы должны быть тщательно высушены.
- Избыток слюны приведет к разбавлению геля и снижению результативности.
- Чувствительность зубов у всех людей разная, некоторые могут почувствовать легкое покалывание и болевые ощущения после процедуры, это нормально и быстро проходит. Если у вас сильная чувствительность, сократите время или полностью прекратите процедуру.

Внимание!

Используйте средство только по назначению. Противопоказано вдыхать или принимать гель вовнутрь. Не глотать

После процедуры плотно закройте ёмкость с гелем.

При попадании геля на кожу, слизистую или одежду немедленно смойте его водой.

Хранить в недоступном для детей месте.

Отбеливатель для зубов не рекомендуется использовать детям до 18 лет, беременным и кормящим женщинам.

Условия хранения: при температуре 10-30°C, в сухом месте.

Срок годности: 2 года.

Изготовитель: Nanchang Dental Bright Technology Co., Ltd. Address : Building 182, Nanchang Jiahai Industrial Park, No.2799 Tianxiang Blvd, Gaoxin Dist., Nanchang, Jiangxi Prov., Китай

Представитель в России: OpticWhite.ru email: sales@opticwhite.ru
125310, Россия, Москва, Митинская ул., д. 55, 172